



Merjenje gibljivosti na enostaven in natančen način

EasyAngle je inovativen medicinski pripomoček, ki omogoča fizioterapevtom in drugim strokovnjakom merjenje gibljivosti vseh relevantnih sklepov v telesu. Dokumentiranje rehabilitacijskih procesov in statusov postaja vse bolj pomembno. EasyAngle to olajša s shranjevanjem meritvenih rezultatov in nudenjem natančnih meritev gibljivosti sklepov. Prav tako omogoča boljše prenašanje povratnih informacij vašim pacientom. EasyAngle je švedska inovacija, ki je označena z oznako CE kot medicinski pripomoček.

EasyAngle – Prednosti

Motiviranje pacientov

Z EasyAnglom je mogoče merjenje statusa in napredka v majhnih korakih, zaradi visoke natančnosti naprave. Izmerjene kote lahko enostavno pojasnite in prikažete svojim pacientom, kar omogoča dodatno motivacijo za sledenje predpisanemu rehabilitacijskemu programu.

Enostavno za uporabo

Merjenje z eno roko omogoča, da fizioterapevt med meritvami nudi oporo svojemu pacientom in omogoča enostaven proces samega merjenja. Samo ena poravnava je potrebna v določenem trenutku in na zaslonu se jasno izpisuje vsaka meritev skupaj s preteklimi petimi meritvami.

Natančnost

EasyAngle ima senzor, ki meri z visoko stopnjo natančnosti, $\pm 1^\circ$.

Učinkovit proces merjenja


Hitro izvajanje meritev omogoča prihranek časa.

Vse v enem


EasyAngle se lahko uporablja za natančno ocenjevanje vseh relevantnih sklepov, kar nudi nadomestilo za goniometer, inklinometer, CROM-napravo, BROM-napravo in skoliometer.




Kako meriti z EasyAngle:

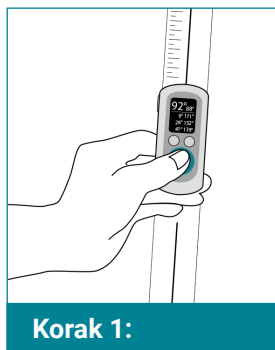


Korak 1:
Pritisnite splošni gumb za vstop v način merjenja.

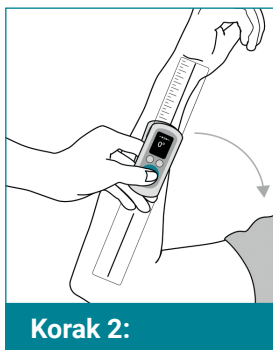

Korak 2:
Poravnajte napravo s prvo okončino in znova pritisnite ta isti gumb, da meritev začnete.

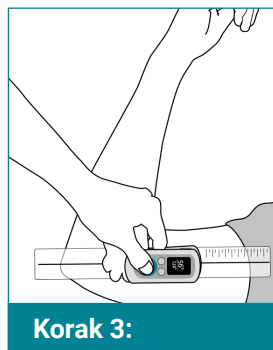

Korak 3:
Poravnajte z drugo okončino in pritisnite gumb, da meritev zaključite. Kot se izračuna in prikaže na zaslonu.

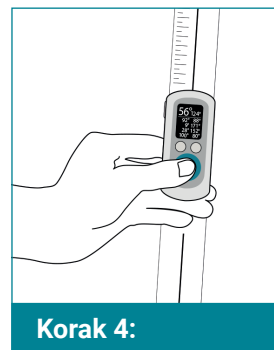

Korak 4:
Ponovno pritisnite gumb za ogled izmerjenega kota skupaj z zadnjimi štirimi meritvami.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dobavljeno v praktičnem pakiranju, ki vsebuje:

- Senzorsko enoto
- Dve vodili za poravnavo: 19,5 cm in 28,0 cm.
- USB polnilec s kablom
- Navodila za uporabo


Čas polnjenja: 2 uri.

Čas delovanja: 2 tedna (12 min uporabe/dan)

Čas pripravljenosti: 11 tednov.

Natančnost senzorja: $\pm 1^\circ$ znotraj 180° .

CE-certifikat: Pridobljen certifikat kot medicinski pripomoček po navedbah MDD 93/42/EEC.

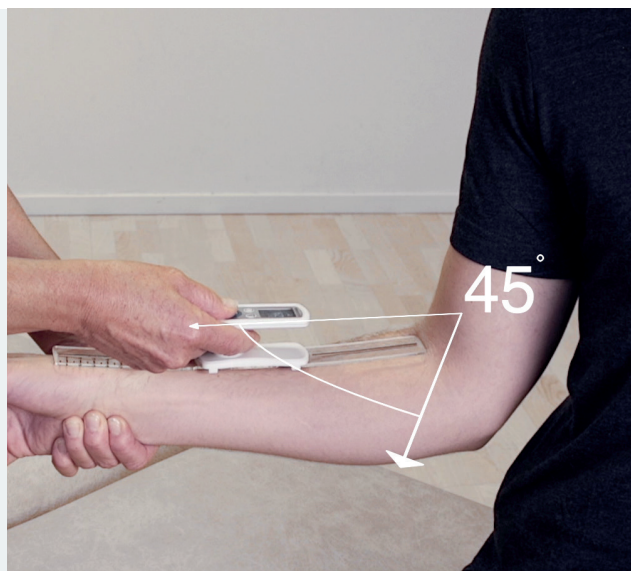

Kako uporabljati EasyAngle

<https://youtu.be/dsfLLoLvHsQ>



easyangle

Več informacij in poučevalni videoposnetki se nahajajo na www.easyangle.com

DOBAVITELJ:



Stjenkova 7, 6000 Koper
www.edman.si
edman@edman.si
t. 05 627 11 55